

Juin 2020

Liste du matériel de laboratoire — QIAsymphony[®] DSP DNA Kits

Tubes/portoirs à échantillons et à éluats pouvant être utilisés avec les troussees QIAsymphony DSP DNA Mini and Midi Kits et QIAsymphony SP (version logicielle 5.0; lot de matériel de laboratoire SOW-516-8)

Ce document est la *liste du matériel de laboratoire* correspondant au lot de matériel de laboratoire SOW-516-8 pour les troussees QIAsymphony DSP DNA Kits, version 1, R1.

Informations générales

L'utilisation de la trousse QIASymphony DSP DNA Kit est réservée au diagnostic *in vitro*.

Important : Avant d'utiliser cette liste du matériel de laboratoire, vérifiez qu'elle correspond au lot de matériel de laboratoire installé sur le système QIASymphony.

Légende



Recommandé : Ces tubes sont destinés à être utilisés avec ce protocole.



Défini par l'utilisateur : L'utilisateur est responsable de la définition et/ou de la validation si celui-ci les estime appropriées.



Non recommandé : Ces tubes ne sont pas destinés à être utilisés avec ce protocole.

x/■ Volume d'échantillon minimal (µl) requis par échantillon et par protocole (indiqué par x)/détection de caillot possible.

x/□ Volume d'échantillon minimal (µl) requis par échantillon et par protocole (indiqué par x)/détection de caillot impossible.

Remarque : D'autres tubes sont disponibles et peuvent être utilisés avec d'autres trousse QIASymphony, mais ils ne sont pas recommandés, quel que soit le protocole pouvant être employé avec cette trousse.

Tiroir « Sample » (échantillon), porte-tubes

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Élément d'insertion	Protocole						
					Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
BD ^s	14 ml Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Élément d'insertion inutile	500/■	500/■	700/■	1 300/■	500/■	700/■	
BD	10 ml Vacutainer® whole blood 16 x 100 mm, K2-EDTA	367525	BD#367525 VacutainerPP 16x100	Élément d'insertion inutile	650/■	650/■	850/■	1 500/■			
BD	4 ml BD™ Vacutainer whole blood, K2-EDTA tube 13 x 75 mm*	367839	BD#367839 VacutainerK2 13x75	Élément d'insertion 01/1A/02	450/□	450/□	650/□	1 400/□			
BD	6 ml BD Vacutainer whole blood, K2-EDTA tube 13 x 100 mm*	367864	BD#367864 VacutainerK2 13x100	Élément d'insertion 01/1A/02	450/□	450/□	650/□	1 400/□			
BD	2.7 ml BD Citrate, 9NC Tube 13 x 75mm	363095	BD#363095 Vacutainer9NC 13x75	Élément d'insertion 01/1A/02	400/□	400/□	600/□	1 400/□			
BD	BD Microtainer® Tubes with Microgard™ Closure†	365963	BD#365963 MicrotainerTube	Élément d'insertion 3B	300/□	300/□	500/□				
BD	2.5 ml PAXgene® Blood DNA Tube 13 x 75 mm*†	761165	BD#761165 PAXgeneDNA 13x75	Élément d'insertion 01/1A/02		450/□	650/□	1 400/□			
BD	10 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 16 x 100 mm	768165	BD_#768165 PAXgene ccfDNA 16x100	Élément d'insertion inutile		650/■	850/■	1 500/■			
Greiner Bio-One	GreinerBioOne Vacuette® 9NC 13 x 75 mm	454382	GR#454382 Vacuette9NC 13x75	Élément d'insertion 01/1A/02	400/□	400/□	600/□	1 400/□			
Greiner Bio-One	9 ml Vacuette K3-EDTA, 16 x 100 mm	455036	GR#455036 VacuettePP 16x100	Élément d'insertion inutile	650/■	650/■	850/■	1 500/■			
Greiner Bio-One	3 ml Vacuette K2-EDTA, 13 x 75 mm	454020	GR#454020 VacuetteK2 13x75	Élément d'insertion 01/1A/02	450/□	450/□	650/□	1 400/□			

Tiroir « Sample » (échantillon), porte-tubes (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Élément d'insertion	Protocole							
					Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue	
Greiner Bio-One	6 ml Vacuette K2-EDTA, 13 x 100 mm	456043	GR#456043 VacuetteK2 13x100	Élément d'insertion 01/1A/02	450/□	450/□	650/□	1 400/□				
Nunc	3.6 ml Nunc® CryoTube® 12.5 x 72 mm	379189	NU#379189 3.6Cryo 12.5x72	Élément d'insertion 1A/02	400/□	400/□	600/□	1 200/□	400/□	600/□		
Sarstedt	4 ml S-Monovette® K2-EDTA, 15 x 75 mm	3.1068.001	SAR#31068001 Monov 15x75	Élément d'insertion inutile	650/■	650/■	850/■	1500/■				
Sarstedt	7.5 ml S-Monovette Lithium-Heparin, 15 x 92 mm	1.1608.001	SAR#11608001 Monov 15x92	Élément d'insertion inutile		650/■	850/■	1500/■				
Sarstedt	9 ml S-Monovette K2-EDTA, 16 x 92 mm	2.1066.001	SAR#21066001 Monov16x92	Élément d'insertion inutile	650/■	650/■	850/■	1500/■				
Sarstedt	2.6 ml S-Monovette K2-EDTA, 13 x 65 mm	4.1901.001	SAR#41901001 MonovK2 13x65	Élément d'insertion 01/1A	450/□	450/□	650/□	1400/□				
Sarstedt	4.9 ml S-Monovette K2-EDTA, 13 x 90mm	4.1931.001	SAR#41931001 MonovK2 13x90	Élément d'insertion 01/1A	450/□	450/□	650/□	1400/□				
Sarstedt	2.7 ml S-Monovette K3-EDTA, 11 x 66 mm	5.1167.001	SAR#51167001 MonovK3 11x66	Élément d'insertion 02/2A	400/□	400/□	600/□	1400/□				
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72.693	SAR#72.693 T2.0 Screw	Élément d'insertion 03/3B	300/□	300/□	500/□		300/□	500/□	□	
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, SKIRTED	72.694	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	Élément d'insertion 3B	300/□	300/□	500/□		300/□	500/□	□	
Sarstedt	1.5 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72.607	SAR#72.607 T1.5 Screw	Élément d'insertion 3B		250/□			250/□			

Suite du tableau à la page suivante

Tiroir « Sample » (échantillon), porte-tubes (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Élément d'insertion	Protocole						
					Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
Sarstedt	3.5 ml Sarstedt® tube 66 x 11.5 mm	60.549.001	SAR#60.549.001 T3.5 ScrewSkirt	Élément d'insertion 02/2A	400/□	400/□	600/□	1 200/□	400/□	600/□	
Terumo	9 ml Venosafe® tube K2-EDTA, 16 x 100mm	VF-109SDK	TER#VF-109SDK Venosafe 16x100	Élément d'insertion inutile	650/■	650/■	850/■	1 500/■			
Terumo	3 ml Venoject® tube K3-EDTA, 13 x 75 mm	VT-053STK	TER#VT-053STK VenojectK3 13x75	Élément d'insertion 1A/02	400/□	400/□	600/□	1 400/□			
Terumo	5.5 ml Venosafe tube K2-EDTA, 13 x 100 mm	VF-076SDK	TER#VF-076SDK VenosafeK2 13x100	Élément d'insertion 1A/02/ 2A	400/□	400/□	600/□	1 400/□			

* Ce type de tube peut être trop lâche dans l'élément d'insertion de tubes 01 ou 02, ce qui peut entraîner un mouvement des tubes pendant le prélèvement de l'échantillon. Nous recommandons l'utilisation de l'élément d'insertion de tubes 1A.

† N'utilisez pas de tubes à gel avec ce matériel de laboratoire.

‡ Le 2,5 ml PAXgene Blood DNA Tube 13 x 75 mm (BD n° de réf. 761165) n'est actuellement pas disponible aux États-Unis.

§ BD était l'ancien fournisseur de ces tubes et Corning Inc. est le fournisseur actuel.

Tiroir « Sample » (échantillon), porte-tubes, matériel de laboratoire FIX

Pour limiter les volumes morts, des tubes secondaires peuvent être utilisés sans détection du niveau de liquide. Le matériel de laboratoire FIX a été conçu dans ce but et ne permet pas la détection du niveau de liquide ou d'un caillot. Les tubes d'échantillon FIX imposent des contraintes d'aspiration; l'échantillon est aspiré à une hauteur définie dans le tube. Cette hauteur est définie par le volume d'échantillon à transférer. En conséquence, il est crucial de s'assurer que le volume indiqué dans le tableau ou la fiche de protocole est utilisé.

Remarque : Il est possible de traiter des tubes pour une utilisation avec ou sans détection du niveau de liquide dans le même lot/la même analyse.

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Élément d'insertion	Protocole						
					Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72.693	SAR_FIX_#72.693 T2.0 Screw	Élément d'insertion 03/3B		220/□	420/□	1 050/□	220/□	420/□	□
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, SKIRTED	72.694	SAR_FIX_#72.694 T2.0 ScrewSkirt	Élément d'insertion 3B		220/□	420/□	1 050/□	220/□	420/□	□

Tiroir « Sample » (échantillon), porte-tubes (mélange de contrôle interne – Buffer ATE)

Remarque : La préparation du mélange de contrôle interne – Buffer ATE est décrite dans la fiche de protocole correspondante.

Remarque : Le porte-tubes contenant le(s) mélange(s) contrôle interne – Buffer ATE doit être placé dans la fente A du tiroir « Sample » (échantillon).

Remarque : Seuls les protocoles permettant l'utilisation d'un contrôle interne sont inclus dans ce tableau.

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Nom sur l'écran tactile	Élément d'insertion	Protocole
					Virus Blood 200
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Élément d'insertion inutile	Virus Blood 200
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72.693	SAR#72.693 T2.0 Screw	Élément d'insertion 03/3B	
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, SKIRTED	72.694	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	Élément d'insertion 3B	

* BD était l'ancien fournisseur de ces tubes et Corning Inc. est le fournisseur actuel.

Tiroir « Eluate » (éluat)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Support sur les fentes d'élution†	Protocole						
						Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
ABgene	ABgene® 2D Storage Plate 1.2 ml	AB-1185	Deep Well	AB#AB-1185 *2.0ml2DPlate	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				AB#AB-1185 2.0ml2DPlate	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
ABgene	ABgene deep well plate 0.8 ml	AB-0765	Deep Well	AB#0765 *0.8ml StoragePlate	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1) [§]							
				AB#0765 0.8ml StoragePlate	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
Eppendorf	Eppendorf® Deepwell Block 96	951033405	Deep Well	EP#951033405 *Block96	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)							
				EP#951033405 Block96	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
Micronic	Micronic™ 1.4 TraXis® tube with box	M52621	Deep Well	MIC#M52621 *1.4TraXisTubes	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)							
				MIC#M52621 1.4TraXisTubes	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							

Suite du tableau à la page suivante

Tiroir « Eluate » (éluat) (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Support sur les fentes d'éluat†	Protocole						
						Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
NUNC	Nunc U96 DeepWell™ Plate1	260252	Deep Well	NU#260252 *DeepWell96 RB	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				NU#260252 DeepWell96 RB	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
QIAGEN	Elution Microtubes CL 96	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				QIA#19588 EMTR	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
QIAGEN	96-well S-block with 2.2 ml wells	19585	Deep Well	QIA#19585 *S-Block96	96-Well Round Bottom QS (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				QIA#19585 S-Block96	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							

Suite du tableau à la page suivante

Tiroir « Eluate » (éluat) (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Support sur les fentes d'éluat†	Protocole						
						Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
REMP Sample Management	REMP® Plate 96 Tube 300	STBR96-300	Deep Well	RE#STBR96-300 *TubeRack300	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)			‡	‡	‡	‡	‡
				RE#STBR96-300 TubeRack300	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)			‡	‡	‡	‡	‡
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72693	Tube 2.0 ml / Tube_2.0ml AdapterV1 (no BC)	SAR#72.693 **T2.0 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							
				SAR#72.693 *T2.0 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							
				SAR#72.693 T2.0 Screw	24-Tube 1,5/2,0 ml QS (fentes non réfrigérantes 2 à 4)							
Sarstedt	1.5 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	72607	Tube, 1.5 ml / Tube_1.5ml AdapterV1 (no BC)	SAR#72.607 **T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							
				SAR#72.607 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							
				SAR#72.607 T1.5 Screw	24-Tube 1,5/2,0 ml QS (fentes non réfrigérantes 2 à 4)							
Sarstedt	2 ml Micro tube, PP, SKIRTED	72694	Tube 2.0 ml / Tube_2.0ml AdapterV1 (no BC)	SAR#72.694 **T2.0 ScrewSkirt	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							

		Protocole
SAR#72.694 *T2.0 ScrewSkirt	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)	
SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	24-Tube 1,5/2,0 ml QS (fentes non réfrigérantes 2 à 4)	

Suite du tableau à la page suivante

Tiroir « Eluate » (éluat) (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Support sur les fentes d'éluat†	Protocole						
						Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
Starlab	1.5 ml Graduated Conical Tube, Natural Standard Screw Cap	E1415-2231	Tube, 1.5 ml / Tube_1.5ml AdapterV1 (no BC)	SL#E1415-2231 **T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				SL#E1415-2231 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS (fente réfrigérante 1)							
				SL#E1415-2231 T1.5 Screw	24-Tube 1,5/2,0 ml QS (fentes non réfrigérantes 2 à 4)							
Thermo Scientific	Matrix® 2D Barcoded ScrewTop Storage Tubes 500 µl	3744	Deep Well	TS#3744 *2DStorageTubes	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				TS#3744 2DStorageTubes	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
Thermo Scientific	Matrix 2D Barcoded Storage Tubes 1.4 ml, Flat Bottom Tubes	3711	Deep Well	TS#3711 *1.4ml 2DStorageT	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)	■	■	■	■	■	■	■
				TS#3711 1.4ml 2DStorageT	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							

Suite du tableau à la page suivante

Tiroir « Eluate » (éluat) (suite)

Fournisseur	Matériel	Exemple de n° de réf.	Catégorie	Nom sur l'écran tactile	Support sur les fentes d'éluat [†]	Protocole						
						Virus Blood 200	Blood 200	Blood 400	Blood 1000	Buffy Coat 200	Buffy Coat 400	DNA Tissue
Thermo Scientific	Matrix Storage Tubes 1.4 ml, Round Bottom Tubes	4247	Deep Well	TS#4247	SBS Universal QS V2 (fente réfrigérante 1)							
				RBStorageT								
				TS#4247	Aucun support nécessaire (fentes non réfrigérantes 2 à 3)							
				1.4ml								
				RBStorageT								

* Indique le matériel de laboratoire pouvant être réfrigéré à l'aide d'un support réfrigérant muni d'un code-barres.

** Indique le matériel de laboratoire pouvant être réfrigéré à l'aide d'un support réfrigérant sans code-barres (non transférable et non utilisable sur le QIASymphony AS).

† N'utilisez pas des plaques de 96 puits dans « Elution slot 4 » (fente d'éluat 4) parce que le bras robotisé n'atteint pas toutes les positions.

‡ Ce format de tube/plaque est limité à un volume d'éluat maximum de 200 µl. Si de plus grands volumes d'éluat sont requis, veuillez sélectionner un autre format de tube/plaque.

§ Matériel de laboratoire non transférable ou non utilisable sur le QIASymphony AS.

Pour commander, consultez le site www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Historique des révisions

Historique des révisions du document	
R1 06/2020	Libération d'un nouveau lot de matériel de laboratoire

Pour obtenir des informations mises à jour sur la licence et les clauses de responsabilité spécifiques des produits, consultez le manuel de la trousse ou le manuel d'utilisation QIAGEN® approprié. Les manuels des trousse et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles sur www.qiagen.com ou peuvent être demandés aux services techniques QIAGEN ou au distributeur local.

Marques de commerce : QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™, Microgard™, Microtainer®, Vacutainer® (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.); Eppendorf®, (Eppendorf AG); Bio-One®, Vacuette® (Greiner Bio-One GmbH); Micronic™, TraXis® (Micronic Holding B.V.); PAXgene® (PreAnalytix, GmbH); Remp® (Remp AG); Sarstedt®, S-Monovette® (Sarstedt AG and Co.); Starlab® (Starlab Group); Terumo®, Venoject®, Venosafe® (Terumo Europe N.V.); 2D Matrix®, ABgene®, CryoTube®, DeepWell™, Nunc®, Thermo Scientific® (Thermo Fisher Scientific ou ses filiales). Les marques déposées, marques de commerce et autres marques citées dans ce document doivent être considérées comme protégées par la loi, même si elles ne sont pas spécifiquement signalées comme telles.
06/2020 HB-0977-L05-001 © 2020 QIAGEN, tous droits réservés.

Commandez sur www.qiagen.com/shop | Soutien technique support.qiagen.com | Site Web www.qiagen.com