
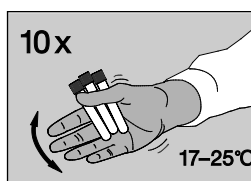


K použití se soupravou
QuantiFERON-CMV
ELISA
(kat. č. 0350-0201).

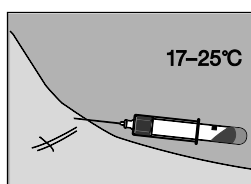

QuantiFERON®-CMV

Zkumavky pro odběr krve

Balení pro jednoho pacienta

Kat. č. 0192-0301

①

OBSAH

3x 1ml zkumavka pro odběr krve QF-CMV (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x příbalová informace

Více informací najdete v *příbalové informaci QuantiFERON-CMV*, která se nachází na adrese www.QuantiFERON.com.

ODBĚR KRVE

②

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Platí standardní bezpečnostní opatření pro zacházení s krví.
- Zkumavky skladujte při 4–25 °C a v okamžiku použití musí mít teplotu okolního prostředí (17–25 °C).

Odeberte krev ze žíly.

Pomocí vakua se zkumavka naplní po černou značku (1 ml). Krev může téct pomalu. Po ukončení odběru držte zkumavku na jehle po dobu 2–3 s. Jestliže krev nedosahuje až ke značce, zopakujte odběr s novou zkumavkou.

Technický tip

Motýlková jehla – před plněním zkumavek QuantiFERON-CMV naplňte hadičku pomocí plnicí zkumavky (není obsažena v dodávce).

ODBĚR KRVE

③

Ihned po naplnění 10x protřeptejte zkumavky tak, aby došlo ke smočení celé vnitřní stěny zkumavek krví a rozpuštění antigenů na jejich stěně.




Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu 17–25 °C.

Příliš silné třepání může narušit gel a mohlo by vést k neplatným výsledkům.

Označte zkumavky příslušným způsobem.



Sample & Assay Technologies

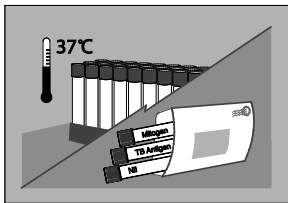

ODESLÁNÍ / INKUBACE

④

Zkumavky odešlete do laboratoře při teplotě 17–27 °C. Krev se musí co nejdříve inkubovat při 37 °C (do 16 hodin od odběru).


Personál laboratoře musí zkumavky promíchat bezprostředně před inkubací při 37 °C.

Technický tip

Zkumavky označte jako „Neinkubované“.

MOŽNOST 1

Inkubace v laboratoři

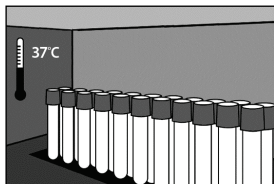

ODESLÁNÍ / INKUBACE

⑤

Krev je nutné inkubovat co nejdříve (do 16 hodin od odběru). Zkumavky inkubujte ve vzpřímené poloze při 37 °C po dobu 16–24 hodin.

Inkubátory může dodat společnost QIAGEN.


Technický tip

Vlhkost/CO₂ není nutná.

Jestliže brzy po odběru nebudou zkumavky inkubovány při 37 °C, je zkumavky nutné bezprostředně před inkubací promíchat převrácením 10x.

MOŽNOST 2

Inkubace na pracovišti odběru

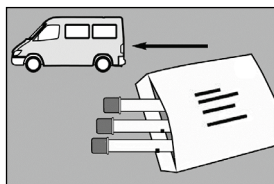

ODESLÁNÍ / INKUBACE

⑥


Odešlete inkubované zkumavky do testující laboratoře (pokud nejsou odstředěné, tak do 3 dnů).

Zkumavky uchovávejte při teplotě 4–27 °C.

Technický tip

Označte zkumavky jako „Inkubované“.

MOŽNOST 2 (pokračování)

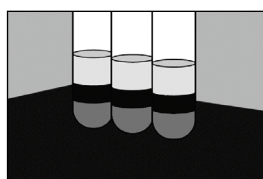

ODSTŘEDĚNÍ

⑦

Před odběrem vzorků zkumavky odstředte.

Odstředujte při 2000–3000 g po dobu 15 minut.

Plazma v odstředěných zkumavkách je stabilní po dobu 28 dní, jestliže je uložena při teplotě 2–8 °C.

Nejnovější licenční informace a prohlášení o výrobku najdete v příbalové informaci QuantiFERON-CMV ELISA.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Ochranné známky: QIAGEN®, QuantiFERON® (skupina QIAGEN).

©2017 QIAGEN; Veškerá práva vyhrazena

1075109CS Rev. 01 01/2017



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
USA
+1-800-426-8157



| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Německo



Sample & Assay Technologies