
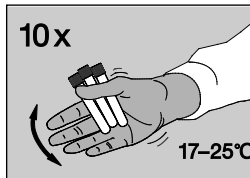


Til brug med
QuantiFERON-CMV
ELISA-kit
(katalognr. 0350-0201).

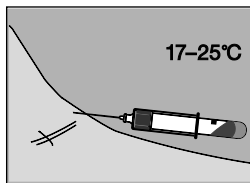

QuantiFERON[®]-CMV

①

Blodprøvetagningsrør

Pakke til én patient

Katalognr. 0192-0301

INDHOLD

3x 1 ml QF CMV-blodprøvetagningsrør (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x indlægsseddel

For yderligere information henvises til *indlægssedlen til QuantiFERON-CMV*, som findes på www.QuantiFERON.com.

BLODPRØVETAGNING

②

! ADVARSEL:

- Standardforholdsreglerne for håndtering af blod skal følges.
- Rør kan opbevares ved 4 °C-25 °C og skal have stuetemperatur (17 °C-25 °C) ved brugstidspunktet.

Indsaml blod ved venepunktur.

Ved hjælp af vakuum fyldes røret til det sorte mærke (1 ml). Blodet kan strømme langsomt. Hold røret ved nålen i 2-3 sekunder, efter blodet er holdt op med at strømme. Fyld mere blod i røret, hvis der ikke er tilstrækkeligt med blod.

Teknisk tip

Sommerfuglekanyler – prim rørene med et gennemskylningsrør (medfølger ikke), før QuantiFERON-CMV-rørene fyldes.

BLODPRØVETAGNING

③

Straks efter påfyldning af rørene skal de rystes ti (10) gange for at sikre, at indersiden af hvert rør fyldes med blod, så antigenerne på indersiden af røret opløses.




Rørene skal have en temperatur på mellem 17-25 °C, når blodet fyldes i dem.

For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater.

Mærk rørene korrekt.



Sample & Assay Technologies

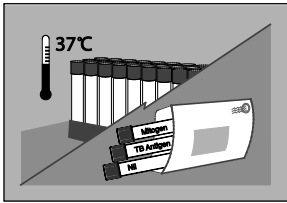

FORSENDELSE/INKUBERING

④

Rørene skal transporteres til laboratoriet ved 17-27 °C. Blod skal inkuberes ved 37 °C så hurtigt som muligt (og inden for 16 timer efter prøvetagningen).


Laboratoriets personale skal blande rørene straks før inkubering ved 37 °C.

Teknisk tip

Mærk rørene som "Ikke-inkuberet".

MULIGHED 1

Inkuber på laboratoriet

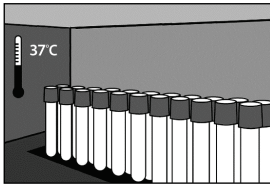

FORSENDELSE/INKUBERING

⑤

Blod skal inkuberes så hurtigt som muligt (og inden for 16 timer efter prøvetagningen). Inkuber rør stående ved 37 °C i 16-24 timer.


Inkubatorer fås muligvis fra QIAGEN.

Teknisk tip

Luffugtighed/CO₂ ikke påkrævet.

MULIGHED 2

Inkuber på prøvetagningsstedet

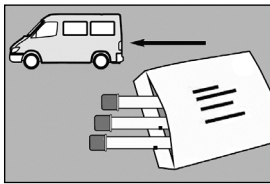

FORSENDELSE/INKUBERING

⑥


Transporter de inkuberede rør til testlaboratoriet (inden for 3 dage, hvis de ikke er centrifugeret).

Opbevar rørene ved 4-27 °C.

Teknisk tip

Mærk rørene som "Inkuberet".

MULIGHED 2 (fortsat)

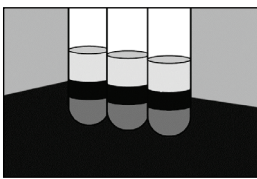

CENTRIFUGERING

⑦

Centrifuger rørene før prøvetagning.

Centrifuger ved 2000-3000 g i 15 minutter.

Plasma i centrifugerede rør er stabil i 28 dage ved opbevaring ved 2-8 °C.

For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til indlægssedlen til QuantiFERON-CMV ELISA.

KONTAKTOPLYSNINGER

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
USA / Canada: techservice-na@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico):
techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com
www.QuantiFERON.com

Varemærker: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (QIAGEN Gruppen).

© 2017 QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes

1075109DA Rev. 01 01/2017



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
USA
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Germany



Sample & Assay Technologies