

digene® HC2 DNR paėmimo priemonė



Pavadinimas ir numatytas naudojimas

digene HC2 DNR paėmimo priemonė yra skirta gydytojo paimtų gimdos kaklelio mėginių, tiriamų naudojant tik *digene* Hybrid Capture® 2 (HC2) ŽPV ir CT/GC DNR testus, bei savarankiškai paimtų vaginalinių mėginių, tiriamų naudojant tik *digene* HC2 High-Risk ŽPV DNR testą®, paėmimui ir transportavimui. ŠI PRIEMONĖ NĖRA SKIRTA PAP PAĖMIMUI.

Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš pradėdami paėmimą naudotojai pirmiausia turi perskaityti šias instrukcijas ir tuomet atlikti kiekvieną žingsnį nurodyta tvarka. Dėl laikymo sąlygų instrukcijų, mėginių transportavimo, ar gydytojo atliekamos paėmimo procedūros detalių žiūrėkite gydytojo atliekamo paėmimo naudojimo instrukcijas, esančias pristatymo dėžėje.

Tiekiami reagentai ir medžiagos

1 x 1 **BRUSH** šepetėlis

1 x 1 ml **STM** Mėginių transportavimo terpė (sudėtyje turinti 0,05% natrio azido).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

⚠ Mėginių transportavimo terpė: Atsargiai! Sukelia nedidelį odos dirginimą. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Žiūrėkite kitą Mėginio paėmimo ir naudojimo instrukcijų lapo pusę.

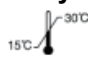

⊗ Nenaudokite pakartotinai ⊗ Nenaudokite, jei pakuotė pažeista

- Gimdos kaklelio šepetėlio negalima naudoti besilaukiančioms moterims. Jei manote, kad laukiatės, prašome informuoti savo gydytoją.
- Nedėkite mėginių transportavimo terpės (mėgintuvėlio skysčio) į burną ir neprarykite. Jei mėgintuvėlio skysčio jums pateko į burną arba jo nurijote, nedelsdami susisiekite su gydytoju.

- Neįkvėpkite mėginių transportavimo terpės (mėgintuvėlio skysčio). Jei įkvėpėte mėgintuvėlio skysčio, pakvėpuokite gaiviu oru; esant nusiskundimų, pasikonsultuokite su gydytoju.
- Jei įvyko kontaktas su akimis, keletą minučių plaukite atmektą akį tekančiu vandeniu. Tada pasikonsultuokite su gydytoju.
- Visus iš žmonių surinktus pavyzdžius laikykite galimai infekciniais.
- Gydytojų paimtiems gimdos kaklelio mėginiams naudokite tik *digene* HC2 ŽPV ir HC2 CT/GC DNR testus. Mėginiai, surinkti naudojant šią sistemą, negali būti naudojami kultivavimui.
- Pačių paimtiems vaginaliniams mėginiams naudokite tik *digene* HC2 High-Risk HPV DNR testą. Mėginiai, surinkti naudojant šią sistemą, negali būti naudojami kultivavimui.
- Neimkite pačių paimamų vaginalinių mėginių, jei mėginio ėmimo vietoje yra priešgrybelinio kremo arba kontraceptinio gelio.
- Nelieskite šepetėlio prieš ir po mėginio paėmimo.
- Nelieskite šepetėlio prie bet kokio objekto, esančio surinkimo mėgintuvėlio išorėje.
- Pačių atliekamą mėginių surinkimą yra numatyta atlikti prižiūrint medicinos profesionalui.

⚠ Mėginių transportavimo terpės sudėtyje yra natrio azido, kuris gali reaguoti su švininiais ir variniais vamzdžiais, susidarant labai sprogiems metalų azidų junginiams. Išmeskite laikydamiesi vietinių reglamentų. **Susisiekite su jūsų vietiniu QIAGEN atstovu arba vietiniu medicinos profesionalu tam, kad gautumėte informacijos, kaip sutvarkyti ar išvalyti išsiplimus.**

Laikymo instrukcijos

 Rinkinius laikykite 15-30 °C temperatūroje. Nenaudokite po to, kai yra pasibaigusi galiojimo data, nurodyta greta simbolio  ant pakuotės etiketės.



Gimdos kaklelio mėginių paėmimas ir naudojimas

Vaginalinė procedūra, kai mėginius surenka pačios pacientės

1. Atsukite arba nutraukite mėgintuvėlio dangtelį ir jį padėkite ant kieto, plokščio paviršiaus, mėgintuvėlio dangtelį nukreipdama į viršų. Būkite atsargi, kad neišpiltumėte mėginių transportavimo terpės (skysčio, esančio mėgintuvėlyje).
2. Švelniai praplėskite makšties išorę ir į angą įterpkite šepetėlį (2 žingsnis).
3. Tęskite šepetėlo įterpimą švelniai sukdamas šepetėlį į kairę ar į dešinę, kol pajusite pasipriešinimą (3 žingsnis). Jei patiriate skausmą ar didelį nepatogumą, sustokite ir pasikonsultuokite su medicinos sesele arba gydytoju.
4. Švelniai laikykite šepetėlį vietoje. Lėtai suskaičiuokite iki 10 prieš sukiodama šepetėlį. Pasukite šepetėlį ratu 5 kartus tam, kad surinktumėte mėginį (4 žingsnis).
5. Ištraukite šepetėlį iš makšties ir jį įdėkite į tiekiamą mėgintuvėlį (šepetėlį nukreipus žemyn) iki jis palies dugną. Tvirtai viena ranka laikydama mėgintuvėlį, o kitą laikydama greta šepetėlio galo, nulaužkite kotelį ties pažymėta linija (5 žingsnis). Nulaužusi kotelį, atlaužtą dalį išmeskite.
6. Mėgintuvėlyje turi likti tik apatinė dalis su šepetėliu, pamerktu mėginių transportavimo terpėje (skystyje, kuris yra mėgintuvėlyje.) . Uždenkite mėgintuvėlį (6 žingsnis), aiškiai užrašykite mėgintuvėlio etiketę ir tuomet atiduokite mėgintuvėlį medicinos profesionalui.

Prekiniai ženklai: QIAGEN®, *digene*®, Hybrid Capture® (QIAGEN grupė).
©2015 QIAGEN, visos teisės saugomos

