

Til bruk med
QuantiFERON-CMV
ELISA-sett
(kat.nr. 0350-0201).

QuantiFERON®-CMV

①

Blodprøvetakingsrør

Pakke til enkeltpasientbruk

Kat. nr. 0192-0301

INNHold

3 x 1 ml QF CMV-blodprøvetakingsrør (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1 x pakningsvedlegg

Du finner mer informasjon i *QuantiFERON-CMV-*

pakningsvedlegget, som er tilgjengelig på

www.QuantiFERON.com.

BLODPRØVETAKING

②

⚠ ADVARSEL:

- Standard forholdsregler for håndtering av blod gjelder.
- Rørene kan oppbevares ved 4–25 °C og må holde romtemperatur (17–25 °C) på brukstidspunktet.

Ta blodprøver ved hjelp av venepunksjon.

Vakuum fyller til det svarte merket (1 ml). Blodstrømmen kan gå sakte. Hold røret på nålen i 2–3 sekunder etter at strømmen stanser. Gjenta røret hvis det ikke er nært merket.


Teknisk tips

Sommerfuglnåler – prime slangen med et renserrør (medfølger ikke) før du fyller QuantiFERON-CMV-rør.

BLODPRØVETAKING

③

Rett etter at rørene er fylt, skal de ristes ti (10) ganger, akkurat godt nok til at hele den innvendige overflaten av røret er dekket med blod, slik at antigen på rørveggene løses opp.

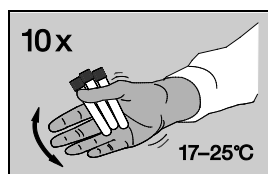


Rørene skal holde 17–25 °C når de fylles med blod. For kraftig risting kan føre til gelforstyrrelse og feil resultater.

Rørene skal merkes riktig.



Sample & Assay Technologies

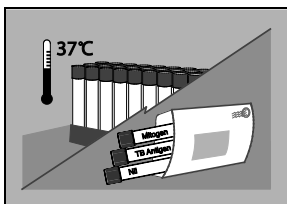

TRANSPORT/INKUBERING

④

Send rørene til laboratoriet ved en temperatur på 17–27 °C. Blodet må inkuberes til 37 °C så snart som mulig (og innen 16 timer etter prøvetaking).


Laboratoriemedarbeidere må blande rørene på nytt umiddelbart før inkubering til 37 °C.

Teknisk tips

Merk rørene som "Ikke inkubert".

ALTERNATIV 1

Inkuber ved laboratoriet

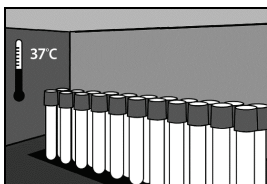

TRANSPORT/INKUBERING

⑤

Blod må inkuberes så snart som mulig (og innen 16 timer etter prøvetaking). Inkuber rørene vertikalt ved 37 °C i 16–24 timer.


Det kan være inkubatorer tilgjengelige fra QIAGEN.

Teknisk tips

Fuktighet/CO₂ er ikke nødvendig.

ALTERNATIV 2

Inkuber ved prøvetaksstedet

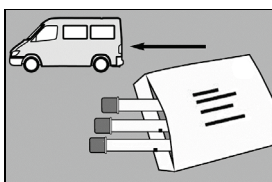

TRANSPORT/INKUBERING

⑥


Send inkuberte rør til testlaboratoriet (innen 3 dager hvis de ikke er sentrifugert).

Rørene skal holde 4–27 °C.

Teknisk tips

Merk rørene som "Inkubert".

ALTERNATIV 2 (forts.)

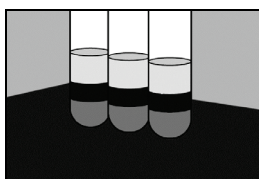

SENTRIFUGERING

⑦

Sentrifuger rørene før prøvetaking.

Spinn ved 2000–3000g i 15 minutter.

Plasma i sentrifugerte rør er stabilt i 28 dager ved oppbevaring ved 2–8 °C.

Du finner oppdatert lisensinformasjon og produktspesifikke ansvarsfraskrivelser i pakningsvedlegget for QuantiFERON-CMV ELISA.

KONTAKTINFORMASJON

QIAGEN

⑧

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
USA/Canada: techservice-na@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico):
techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com
www.QuantiFERON.com

Varemerker: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (QIAGEN-gruppen).

© 2017 QIAGEN. Med enerett.

1075109NO Rev. 01 01/2017



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
USA
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Tyskland



Sample & Assay Technologies