

Aprilie 2022

Notă importantă

Actualizare a fișierului de definiție a testului (Assay Definition File, ADF) QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel la versiunea 1.1

NOTĂ: CITIȚI ȘI URMAȚI INSTRUCȚIUNILE ACESTEI ADRESE ÎNAINTE DE A UTILIZA QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis PANEL.

Stimate client,

QIAGEN este devotată satisfacerii nevoilor clienților noștri și depunem în mod constant eforturi pentru a aduce valoare adăugată produselor și serviciilor. Ca urmare, dorim să vă informăm cu privire la o actualizare a fișierului de definiție a testului (Assay Definition File, ADF) pentru QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel (nr. cat. 691611).

Această nouă versiune a fișierului ADF include multiple actualizări ale mesajelor de eroare pentru o mai bună claritate și actualizarea configurației pentru a îmbunătăți fiabilitatea testării. Clienții trebuie să instaleze acest nou fișier ADF înainte de a utiliza QIAsat-Dx Meningitis Panel. Această actualizare ADF nu va dura mai mult de 1 minut.

Pentru a utiliza noul ADF, va trebui să importați fișierul ADF QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis versiunea 1.1 în sistemul QIAsat-Dx Analyzer 1.0. Fișierul ADF QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel este compatibil cu sistemul QIAsat-Dx Analyzer 1.0 pe care rulează software versiunea 1.4 și mai recentă.

Modul de actualizare a fișierului ADF QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel la versiunea -1.1

Actualizarea fișierului ADF QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel la versiunea 1.1 poate fi efectuată de clienți. Dacă întâmpinați probleme în timpul actualizării, contactați Serviciile tehnice QIAGEN la support.qiagen.com

Pentru a actualiza fișierul dvs. ADF QIAsat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel la versiunea 1.1 și pentru a importa versiunea actualizată a testului în sistemul dvs. QIAsat-Dx Analyzer 1.0, parcurgeți următorii pași:

1. Solicitați fișierul ADF de la reprezentanța locală de vânzări QIAGEN sau vizitați pagina <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>

2. În fila **Product Resources** (Resurse produs), faceți clic pe **Protocol Files** (Fișiere protocol) și descărcați fișierul ADF QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel versiunea 1.1. Salvați și dezarhivați pachetul. Copiați fișierul *.asy în folderul rădăcină de pe dispozitivul de stocare USB (direct pe dispozitivul de stocare USB, nu în orice folder).
3. Introduceți dispozitivul de stocare USB care conține fișierul ADF corespunzător în portul USB al sistemului QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Apăsați butonul **Options** (Opțiuni), apoi butonul **Assay Management** (Gestionarea testelor). Ecranul „Assay Management” (Gestionare a testelor) apare în zona de conținut a afișajului.
5. Apăsați pictograma **Import** din partea stânga jos a ecranului.
6. Selectați fișierul ADF pe care doriți să îl importați de pe dispozitivul de stocare USB.
7. Va apărea o casetă de dialog în care va trebui să confirmați încărcarea fișierelor.
8. Este posibil să apară o casetă de dialog în care să vi se ceară să suprascrieți versiunea actuală cu versiunea nouă. Apăsați **Yes** (Da) pentru a confirma.
9. Selectați **Assay Active** (Test activ) pentru a activa testul.
10. Alocați utilizatorului testul activ, apăsând butonul Options (Opțiuni), apoi butonul User Management (Gestionarea utilizatorilor).
Selectați utilizatorul căruia trebuie să i se permită rularea testului.
Selectați **Assign Assays** (Alocare taste) din **User Options** (Opțiuni utilizator).
Activați testul și apăsați butonul **Save** (Salvare).

Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni de utilizare pentru testul specific (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel).

Nu ezitați să ne contactați prin intermediul reprezentanței de vânzări QIAGEN dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la punctele menționate mai sus.

Cu sinceritate,

Echipa dvs. QIAGEN
www.qiagen.com