

# 1 QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

## Kraujo surinkimo mėgintuvėliai


Pakuotė vienam pacientui

(Kat. Nr. 622222) Naudoti esant aukščiai nuo jūros lygio iki 810 m virš jūros lygio.  
(Kat. Nr. 623222) Naudoti 1 020–1 875 m aukštyje virš jūros lygio.

### TURINYS

4x QFT-Plus kraujo surinkimo mėgintuvėliai (Nil, TB1, TB2, Mitogen)

1x informacinis lapelis

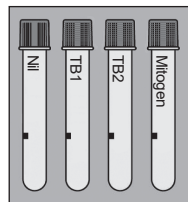


1085211LT leid. 04 2018-09

Naudojant ne nurodytame aukščio virš jūros lygio intervale, gali keistis kraujo paėmimo tūris. Skirta naudoti su QFT-Plus ELISA rinkiniu (Kat. Nr. 622120 ir 622822).



# 2 KRAUJO SURINKIMAS

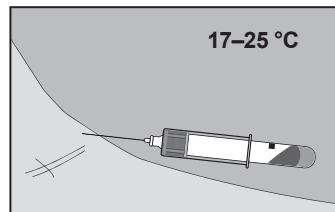

### ĮSPĖJIMAS:

- Taikomos įprastos su kraujo procedūromis susijusios atsargumo priemonės.
- Mėgintuvėlius galima laikyti ir jie turi būti naudojami kambario temperatūroje (17–25 °C).

Imkite kraują iš venos.

Vakuumas užpildo iki 1 ml (juoda žyma nurodo priimtina 0,8–1,2 ml intervalą).

Kraujo srovė gali būti silpna.


Nenuimkite mėgintuvėlio nuo adatos, kol srovė nenusios tekėjusi (2–3 sek.).

Jei žymė nepasiekta, dar kartą uždėkite mėgintuvėlį.

### Techninis patarimas

Jei naudojate adatas su sparneliais, prieš pradėdami pildyti QFT-Plus mėgintuvėlius, patikrinkite kateterio pralaidumą naudodami įprastą mėgintuvėlį (nepriedamas).

# 3 KRAUJO SURINKIMAS

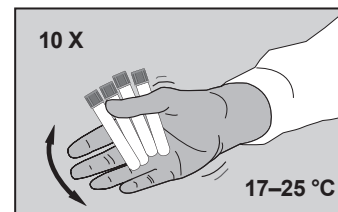

Pripildę mėgintuvėlius, pakratykite juos dešimt (10) kartų, kad visas vidinis mėgintuvėlio paviršius būtų padengtas krauju ir ištirptų ant mėgintuvėlio sienelių esantys antigenai.




Kraujo surinkimo metu mėgintuvėliai turi būti 17–25 °C temperatūros.

Per stipriai pakračius gali būti suardytas gelis ir taip iškreipti rezultatai.

Pažymėkite mėgintuvėlius tinkamomis etiketėmis.

# 4 GABENIMAS/INKUBAVIMAS

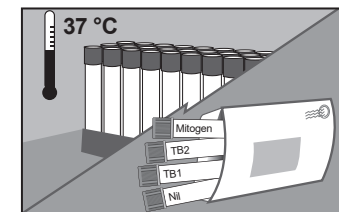

1 VARIANTAS Inkubavimas laboratorijoje

Nugabenkite mėgintuvėlius į laboratoriją 17–27 °C temperatūroje. Kraujas kuo greičiau turi būti inkubuojamas 37 °C temperatūroje (per 16 valandų nuo surinkimo).


Laboratorijos darbuotojai turi sumaišyti mėgintuvėlių turinį, 10 kartų pavartydami, prieš pat inkubavimą 37 °C temperatūroje.

### Techninis patarimas

Pažymėkite mėgintuvėlius „Neinkubuota“.

# 5 GABENIMAS/INKUBAVIMAS

2 VARIANTAS Inkubavimas surinkimo vietoje

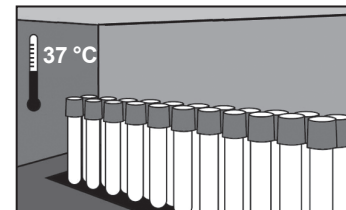

Kraujas turi būti kuo greičiau (per 16 valandų nuo surinkimo) inkubuojamas vertikaliajoje padėtyje. Inkubuokite mėgintuvėlius vertikaliajoje padėtyje 16–24 val., esant 37 °C temperatūrai.

Inkubatorius galima įsigyti iš QIAGEN.


### Techninis patarimas

Drėgmė / CO<sub>2</sub> neturi reikšmės.

Jeigu mėgintuvėliai neinkubuojami iš karto po surinkimo, esant 37 °C temperatūrai, iš karto prieš inkubavimą mėgintuvėlių turinys turi būti sumaišytas (kartą 10 kartų).

# 6 GABENIMAS/INKUBAVIMAS

2 VARIANTAS (tęsinys)

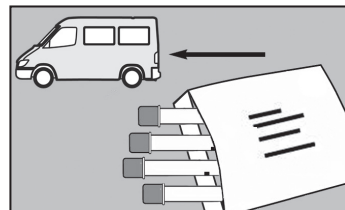

Nugabenkite inkubuotus mėgintuvėlius į tyrimų laboratoriją (per 3 dienas). Mėgintuvėliai turi būti laikomi 4–27 °C temperatūroje.


### Techninis patarimas

Pažymėkite mėgintuvėlius „Inkubuota“.



www.QuantiFERON.com

# 7 CENTRIFUGAVIMAS

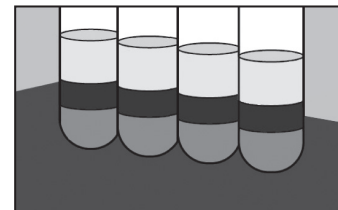

Prieš paimdami mėginius, mėgintuvėlius centrifuguokite. Otāceni nastavte na 2000-3000 g po dobu 15 minut.

Ištirskite plazmą naudodami „QFT-Plus ELISA“ arba „LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus System“ (NUOR.: 311010)

Centrifuguotuose mėgintuvėliuose 2–8 °C temperatūroje laikoma plazma išlieka stabili 28 d.

Naujausia informacija apie licencijavimą ir tam tikrų produktų garantinių įsipareigojimų atsisakymai pateikti „QFT-Plus ELISA“ arba „LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus System“ pakuočių informaciniuose lapeliuose.

# 8 KONTAKTINĖ INFORMACIJA

QIAGEN  
Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com  
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com  
Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com  
Latin America (not including Brazil or Mexico): techservice-latam@qiagen.com  
Mexico: techservice-MX@qiagen.com  
Brazil: techsebr@qiagen.com



QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Vokietija  
+49-2103-29-0



IVD



4 °C 25 °C



Antigens licensed from Statens Serum Institut ssi.dk | serum@ssi.dk

Sample to Insight

