

Note importante

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, RÉF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), RÉF 870311

Cher utilisateur du *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

Vous avez été récemment informé que QIAGEN avait révisé le mode d'emploi des *therascreen* EGFR PCR Kits afin de réduire le risque lié aux artefacts de fluorescence entraînant des cycles non valides ou des résultats faux positifs aux mutations et de souligner l'importance d'un mélange minutieux des réactifs. Un seuil de delta C_T (ΔC_T) plus bas et un contrôle manuel supplémentaire des valeurs delta CT (ΔCT) ont été introduits pour éviter tout résultat faux positif dû à ces artefacts de fluorescence.

Dans cette Note importante, nous voulons vous informer que la détermination automatique des résultats dans le logiciel Rotor-Gene a été mise à jour et que de nouvelles révisions du manuel du kit correspondant ont été publiées :

- Révision 7 pour le *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, RÉF 874111
- Révision 5 pour le *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), RÉF 870311

Ces nouvelles révisions du manuel incluent toutes les modifications des modes d'emploi correspondants. Veuillez consulter l'historique des révisions du document du manuel du *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit concerné pour plus de détails.

L'Assay Package pour la détermination automatique des résultats (disponible uniquement pour la RÉF 874111) peut être téléchargé sur la page web du produit *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit à l'adresse www.qiagen.com. Allez à Product Resources (Ressources produit) > Supplementary Protocols (Protocoles supplémentaires) afin de télécharger l'Assay Package.

Traductions de cette note importante

QIAGEN fournit la Note importante au format papier en anglais. Les traductions de la Note importante sont disponibles sous forme électronique au format PDF. Vous pouvez accéder aux traductions dans l'onglet Product Resources (Ressources produit) de la page correspondant au produit sur www.qiagen.com.

Pour toute question ou inquiétude, n'hésitez pas à contacter votre département des Services techniques de QIAGEN. Veuillez consulter les sites Web suivants pour les coordonnées :

Filiales de QIAGEN :

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Partenaires commerciaux et importateurs QIAGEN :

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Nous vous prions d'agréer, Cher utilisateur, l'expression de notre considération distinguée.

QIAGEN

www.qiagen.com