

## Önemli Not

**NOT:** QIAstat-Dx RESPIRATORY SARS-CoV-2 PANEL'I KULLANMADAN ÖNCE BU MEKTUPTA YER ALAN TALİMATLARI OKUYUN VE BUNLARA UYUN.

### QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Tahlil Tanımlama Dosyası (Assay Definition File, ADF), Sürüm 1.4'e Güncelleme

Değerli müşterimiz,

QIAGEN olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt ederiz ve ürünler ve hizmetlerde en iyi değeri sunmak için durmaksızın çalışırız. Bu kapsamda, sizi QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (Kat No. 691214) ürününe yönelik bir Tahlil Tanımlama Dosyası (Assay Definition File, ADF) güncellemesi hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Bu yeni ADF, test güvenilirliğini artırmak ve Dahili Kontrolde yanlış negatifleri azaltmak amacıyla yeni bir akışkan protokolü sağlamaktadır. Ayrıca bu yeni ADF, tahlilin deniz seviyesinin üzerinde 3100 m'ye kadar olmak üzere daha yüksek rakımlarda çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır. Müşterilerin, QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel'ı kullanmadan önce bu yeni ADF'yi sistemlerine kurmaları gerekmektedir. Bu ADF güncellemesi en fazla 1 dakikanızı alacaktır.

Yeni ADF'yi kullanmak için QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 ADF'si sürüm 1.4'ü QIAstat-Dx Analyzer 1.0 cihazınıza aktarmanız gerekir. QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF'si, yazılım sürümü 1.3 ve üzerini çalıştıran QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ile uyumludur.

#### **QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF'nizi Sürüm 1.4'e güncelleme**

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF'si sürüm 1.4'e güncelleme işlemi müşteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Güncelleme sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen **support.qiagen.com** adresinden QIAGEN Teknik Servisleri ile iletişime geçin.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF'nizi sürüm 1.4'e güncellemek ve tahlilin güncellenmiş sürümünü QIAstat-Dx Analyzer 1.0 cihazınıza aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. ADF dosyasını QIAGEN satış temsilcinizden isteyin veya <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/> adresine gidin.

2. **Product Resources** (Ürün Kaynakları) sekmesinde **Protocol Files** (Protokol Dosyaları) ögesine tıklayın ve QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF'si sürüm 1.4'ü indirin. Paketi kaydedin ve .zip dosyasını açın. \*.asy dosyasını USB depolama aygıtının kök klasörüne (herhangi bir klasöre değil, doğrudan USB depolama aygıtına) kopyalayın.
3. İlgili ADF'yi içeren USB depolama aygıtını QIAstat-Dx Analyzer 1.0 cihazının USB portuna takın.
4. **Options** (Seçenekler) düğmesine ve ardından **Assay Management** (Tahlil Yönetimi) düğmesine basın. Assay Management (Tahlil Yönetimi) ekranı, ekranın içerik alanında görüntülenir.
5. Ekranın sol alt kısmındaki **Import** (İçe Aktar) simgesine basın.
6. USB depolama aygıtından içe aktarılacak ADF dosyasını seçin.
7. Bir iletişim kutusu görüntülenir ve dosyaların yüklenmesini onaylamanız gerekir.
8. Size yeni sürümün mevcut sürüm üzerine yazılıp yazılmayacağını soran bir iletişim kutusu görüntülenebilir. Doğrulamak için **Yes** (Evet) seçeneğine basın.
9. Tahlilin etkin hale gelmesi için **Assay Active** (Tahlil Etkin) ögesini seçin.
10. **Options** (Seçenekler) düğmesine ve ardından **User Management** (Kullanıcı Yönetimi) düğmesine basarak etkin tahlili kullanıcıya atayın.  
Tahlili çalıştırmasına izin verilecek kullanıcıyı seçin.  
**User Options** (Kullanıcı Seçenekleri) kısmından **Assign Assays** (Tahlil Ata) ögesini seçin.  
Tahlili etkinleştirin ve **Save** (Kaydet) düğmesine basın.

Ek bilgi için ilgili tahlilin (QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel) kullanım talimatları kılavuzuna bakın.

Yukarıda bahsi geçen hususlar hakkında başka sorularınız olması halinde lütfen QIAGEN satış temsilciniz aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Saygılarımızla,

QIAGEN ekibiniz  
[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)