

Għal użu b'kitt ta' QuantiFERON-CMV ELISA (Nru tal-katalogu 0350-0201).

QuantiFERON[®]-CMV Tubi tal-Ġbir tad-Demm Pakkett Wieħed għall-Pazjent Nru tal-Katalogu: 0192-0301


①

KONTENUT

3x 1 ml QF CMV tubi tal-ġbir tad-dem (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x Fuljett tal-Pakkett

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok irreferi għall-**Fuljett tal-Pakkett ta' QuantiFERON-CMV** li jinsab f'www.QuantiFERON.com.

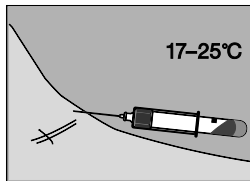

⚠ ĠBIR TAD-DEMM

②

TWISSIJA

- Prekawzjonijiet standard dwar il-ġbir tad-dem japplikaw.
- It-tubi jistgħu jinżammu f'temperatura ta' bejn 4°C-25°C u għandhom ikunu f'temperatura ambjentali (17°C-25°C) fil-ħin tal-użu.

Igbor id-demm bil-venipuntura.

Il-vakwu jimla sal-marka s-sewda (1 ml).

Il-fluss tad-dem jista' jkun bil-mod.


Ibqa' żomm it-tubu fuq il-labra għal 2-3 sekondi wara li l-fluss jieqaf.

Imla t-tubu b'aktar demm jekk ma tkunx ilħaqt il-marka.

Suġġeriment Tekniku

Labar tal-farfett - ipprajmja l-pajp b'tubu li tiskarta (mhux fornut) qabel ma timla t-tubi ta' QuantiFERON-CMV.



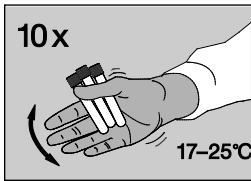

ĠBIR TAD-DEMM

Eżatt wara li timla t-tubi, ħallathom għal għaxar (10) ③ darbiet, bis-saħħa biżżejjed biex tiżgura li l-wiċċ kollu ta' gewwa tat-tubu jiġi miksi bid-demm sabiex jinħallu l-antigeni li jinsabu mal-uċuħ tat-tubu.




It-tubi għandhom ikunu f'temperaturi ta' 17-25°C fil-ħin li jimtlew bid-demm.

Taħlit qawwi żżejjed jista' jikkawża sfażzar fil-gell u jista' jwassal għal riżultati anormali.

Immarka t-tubi b'mod xieraq.



Sample & Assay Technologies

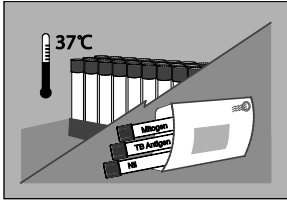


TRASBORD / INKUBAZZJONI

④

Ibgħat it-tubi lil-laboratorju f'temperatura ta' 17-27°C.
Id-demm għandu jiġi inkubat f'temperatura ta' 37°C kemm jista' jkun malajr (u fi żmien 16-il siegħa mill-ġbir)

L-istaff tal-laboratorju għandu jerga' jhallat it-tubi qabel l-inkubazzjoni f'temperatura ta' 37°C.

GHAŻLA 1 Inkuba fil-Laboratorju

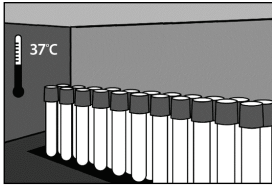

TRASBORD / INKUBAZZJONI

⑤


Id-demm għandu jiġi inkubat kemm jista' jkun malajr (u fi żmien 16-il siegħa mill-ġbir).
Inkuba t-tubi weqfin f'temperatura ta' 37°C għal 16-24 siegħa
L-inkubaturi jistgħu jkunu disponibbli minn QIAGEN

Suġġeriment Tekniku

Umdità/CO₂ mhux meħtieġa

GHAŻLA 2 Inkuba fis-Sit tal-ġbir

Jekk it-tubi ma jiġux inkubati f'temperatura ta' 37°C f'tit wara l-ġbir, it-taħlit tat-tubi b10 inverżjonijiet għandu jsir immedjatament qabel l-inkubazzjoni.

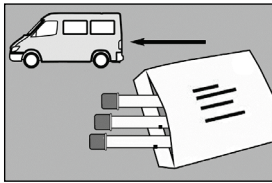

TRASBORD / INKUBAZZJONI

⑥


Ibgħat t-tubi inkubati għall-ittestjar fil-laboratorju (fi żmien 3 ijiem, jekk ma jiġux iċċentrifugati).

Żomm it-tubi f'temperaturi ta' bejn 4-27°C.

Suġġeriment Tekniku

Immarka t-tubi bħala "Inkubati".

GHAŻLA 2 (tkompli)

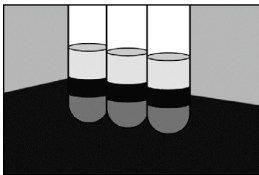

ĊENTRIFUGAZZJONI

⑦

Iċċentrifuga t-tubi qabel il-kampjunar.

Dawwar b'2000-3000 g għal 15-il minuta.

Il-plażma f'tubi ċentrifugati hija stabbli għal 28 jum meta miżmuma f'temperatura ta' 2-8°C.

Għal informazzjoni aġġornata dwar liċenzjar u tiċħid speċifiku dwar il-prodott, ara l-Fuljett tal-Pakkett ta' QuantiFERON-CMV ELISA.

DETTALJI TA' KUNTATT

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
USA/Canada: techservice-na@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico):
techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com
www.QuantiFERON.com

Marki registrati QIAGEN®, QuantiFERON® (Grupp QIAGEN).

© 2017 QIAGEN, kull dritt riżervat

1075109MT Rev. 01 01/2017



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
L-Istati Uniti tal-Amerka
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Il-Ġermanja



Sample & Assay Technologies