
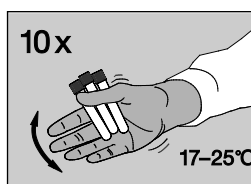


Skirta naudoti su „QuantiFERON-CMV ELISA Kit“ (Kat. nr. 0350-0201).

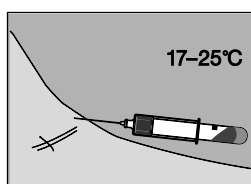

„QuantiFERON®-CMV“

①

Kraujo surinkimo mėgintuvėliai

Pakuotė vienam pacientui

Kat. Nr. 0192-0301

TURINYS

3 x 1 ml QF CMV kraujo surinkimo mėgintuvėliai (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x informacinis lapelis

Daugiau informacijos rasite „QuantiFERON-CMV“

informaciniame lapelyje, apsilankę svetainėje

www.QuantiFERON.com.

KRAUJO SURINKIMAS

②

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Taikomos įprastos su kraujo procedūromis susijusios atsargumo priemonės.
- Mėgintuvėlius galima laikyti 4–25 °C temperatūroje. Naudojimo metu jie turi būti kambario temperatūros (17–25 °C).

Imkite kraują iš venos.

Vakuumas užpildo iki juodos žymės (1 ml). Kraujo srovė gali būti silpna. Nenuimkite mėgintuvėlio nuo adatos, kol srovė nenustos tekėjusi (2–3 sek.). Jei žymė nepasiekta, dar kartą uždėkite mėgintuvėlį.

Techninis patarimas

Jei naudojate adatas su sparneliais, prieš pradėdami pildyti „QuantiFERON-CMV“ mėgintuvėlius, patikrinkite kateterio pralaidumą naudodami papildomą mėgintuvėlį (nepridedamas).

KRAUJO SURINKIMAS

③

Pripildę mėgintuvėlius, pakratykite juos dešimt (10) kartų, kad visas vidinis mėgintuvėlio paviršius būtų padengtas krauju ir ištirptų ant mėgintuvėlio sienelių esantys antigenai.




Kraujo surinkimo metu mėgintuvėliai turi būti 17–25 °C temperatūros.

Per stipriai pakračius gali būti suardytas gelis ir taip iškreipti rezultatai.

Pažymėkite mėgintuvėlius tinkamomis etiketėmis.



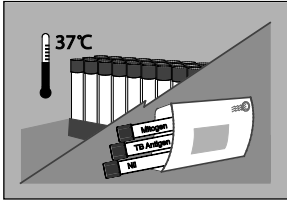

GABENIMAS / INKUBAVIMAS

④


Nugabenkite mėgintuvėlius į laboratoriją 17–27 °C temperatūroje. Kraujas kuo greičiau turi būti inkubuojamas 37 °C temperatūroje (per 16 valandų nuo surinkimo).

Laboratorijos darbuotojai turi sumaišyti mėgintuvėlių turinį prieš pat inkubavimą 37 °C temperatūroje.

Techninis patarimas

Pažymėkite mėgintuvėlius „Neinkubuota“.

1 VARIANTAS Inkubavimas laboratorijoje

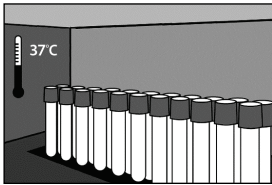

GABENIMAS / INKUBAVIMAS

⑤


Kraujas turi būti inkubuojamas kuo greičiau (per 16 valandų nuo surinkimo). Inkubuokite mėgintuvėlius vertikaliaje padėtyje 16–24 val., esant 37 °C temperatūrai.

Inkubatorius galima įsigyti iš QIAGEN.

Techninis patarimas

Drėgmė / CO₂ neturi reikšmės.

2 VARIANTAS Inkubavimas surinkimo vietoje

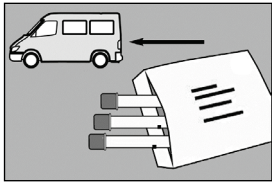

GABENIMAS / INKUBAVIMAS

⑥


Nugabenkite inkubuotus mėgintuvėlius į tyrimų laboratoriją (per 3 dienas, jei necentrifuguoti).

Mėgintuvėliai turi būti laikomi 4–27 °C temperatūroje.

Techninis patarimas

Pažymėkite mėgintuvėlius „Inkubuota“.

2 VARIANTAS (tęsinys)

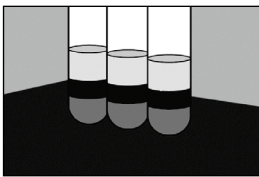

CENTRIFUGAVIMAS

⑦

Prieš paimdami mėginius, mėgintuvėlius centrifuguokite.

Sukite 2000–3000 g 15 min.

Centrifuguotuose mėgintuvėliuose 2–8 °C temperatūroje laikoma plazma išlieka stabili 28 d.

Naujausia informacija apie licencijavimą ir tam tikrų produktų garantinių įsipareigojimų atsisakymai pateikti „QuantiFERON-CMV ELISA“ informaciniame lapelyje.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Prekių ženklai: QIAGEN[®], QuantiFERON[®] (QIAGEN grupė).

© 2017 QIAGEN. Visos teisės saugomos.

1075109LT leid. 01 2017/01



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
JAV
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Vokietija



Sample & Assay Technologies