

## Σημαντική σημείωση

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Αξιότιμε πελάτη του *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

Έχετε λάβει ενημέρωση ότι η QIAGEN έχει αναθεωρήσει τις Οδηγίες χρήσης για τα *therascreen* EGFR PCR Kit με σκοπό να μειωθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος που οφείλεται σε πλασματικά ευρήματα φθορισμού, τα οποία οδηγούν σε μη έγκυρες εκτελέσεις ή αποτελέσματα ψευδώς θετικά σε μετάλλαξη, και να επισημανθεί πόσο σημαντική είναι η σχολαστική ανάμειξη αντιδραστηρίων. Εισήχθη χαμηλότερη οριακή τιμή αποκοπής για το δέλτα C<sub>T</sub> ( $\Delta C_T$ ) και ένας πρόσθετος χειροκίνητος έλεγχος για τις τιμές δέλτα CT ( $\Delta CT$ ) για να αποφευχθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα εξαιτίας τέτοιων πλασματικών ευρημάτων φθορισμού.

Με την παρούσα σημαντική σημείωση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενημερωθεί ο αυτόματος προσδιορισμός αποτελεσμάτων στο λογισμικό Rotor-Gene και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία οι νέες αναθεωρήσεις του αντίστοιχου εγχειριδίου του kit:

- Αναθεώρηση 7 για το *therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2 REF 874111
- Αναθεώρηση 5 για το *therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24) REF 870311

Αυτές οι νέες αναθεωρήσεις του εγχειριδίου περιλαμβάνουν όλες τις αντίστοιχες αλλαγές στις Οδηγίες χρήσης. Ανατρέξτε στο Ιστορικό αναθεώρησης εγγράφου του Εγχειριδίου του *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit που διαθέτετε για περισσότερες πληροφορίες.

Το Πακέτο προσδιορισμού για αυτόματο προσδιορισμό αποτελεσμάτων (διαθέσιμο μόνο για το REF 874111) είναι διαθέσιμο προς λήψη στην ιστοσελίδα του προϊόντος *therascreen* EGFR RQ PCR Kit στον ιστότοπο **www.qiagen.com**. Μεταβείτε στο **Product Resources** (Πόροι προϊόντος) > **Supplementary Protocols** (Συμπληρωματικά πρωτόκολλα) για να πραγματοποιήσετε λήψη του πακέτου προσδιορισμού.

Μεταφράσεις αυτής της σημαντικής σημείωσης

Η QIAGEN παρέχει την έντυπη μορφή της σημαντικής σημείωσης στην αγγλική γλώσσα. Οι μεταφράσεις της σημαντικής σημείωσης είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες σε μορφή portable document format (PDF). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μεταφρασμένα έγγραφα από την ενότητα Product Resources (Πόροι προϊόντος) στη σελίδα του αντίστοιχου προϊόντος στον ιστότοπο **www.qiagen.com**.

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε με το τοπικό Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της QIAGEN. Για στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Θυγατρικές της QIAGEN:

**<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>**

Εμπορικοί συνεργάτες και εισαγωγείς της QIAGEN:

**<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>**

Με εκτίμηση,

QIAGEN

**[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)**