

Abril 2017

## Aviso importante

Prezado cliente,

Disponibilizámos o novo software **PyroMark® Q24, versão 2.0.8**, nos instrumentos PyroMark Q24. Este novo software é compatível com os sistemas operativos Windows® XP, Windows 7 e agora também Windows 10.

Se o seu instrumento PyroMark Q24 tiver sido fornecido com uma versão anterior do software, pode atualizá-lo para a versão 2.0.8 efetuando a transferência em **[www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade)** (PyroMark Q24). Também pode encomendar o software PyroMark Q24, versão 2.0.8, em CD (ref. 9019062).

Os novos Pyro® Plug-ins que se seguem para os kits Pyro foram verificados e aprovados para utilização com o novo software PyroMark Q24, versão 2.0.8.

- EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in v.1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in v.1.3.0
- GIST Pyro Plug-in v.1.3.0.

---

Os plug-ins estão disponíveis para transferência na respetiva página de catálogo em **www.qiagen.com**, no separador "Product Resources" (Recursos do produto), secção "Analysis Software" (Software de análise). Recomendamos a todos os clientes que atualizem o seu sistema para a versão mais recente logo que possível. Os clientes deverão seguir os procedimentos locais no sentido de assegurar uma implementação adequada no seu laboratório.

**Nota:** Os plug-ins apenas são válidos em combinação com o software PyroMark Q24, versão 2.0.8.

**Nota:** À exceção do EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, os plug-ins apenas foram atualizados para assegurar a compatibilidade com o novo software PyroMark Q24, versão 2.0.8. Os resultados obtidos com a versão 2.0.8 do software PyroMark Q24 atualizado e os novos plug-ins foram verificados e a equivalência com os resultados das versões anteriores dos plug-ins foi confirmada.

**Nota:** No EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0, verificou-se que a versão anterior do EGFR Pyro Plug-in não detetava corretamente as deleções raras do exão 19 2239\_2251>C e 2238\_2248>GC. Em vez disso, o software apresentava resultados inválidos, solicitando aos utilizadores que efetuassem a análise manualmente. Este problema foi solucionado como parte desta atualização.

Para obter ajuda na atualização dos ensaios de rotina Pyro, contacte o representante de vendas ou o departamento local de apoio ao cliente da QIAGEN em **www.qiagen.com/contact**.

Com os melhores cumprimentos,

A sua equipa QIAGEN

Marcas comerciais: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN Group); Windows® (Microsoft Corporation).  
1106909 04/2017 HB-1960-002  
© 2017 QIAGEN, todos os direitos reservados.